

Mascherina chirurgica di Tipo IIR

Mascherina filtrante monouso a 3 strati di Tipo IIR, è un Dispositivo Medico (DM) di Classe I.

BFE certificato in Italia 99%. Conforme alla normativa UNI EN 14683:2019+AC:2019.

Provviste di Dichiarazione di Conformità CE e iscrizione al Registro dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute.



NOTA INFORMATIVA:

Consultare queste istruzioni prima dell'utilizzo.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'UTILIZZO:

Prima dell'utilizzo verificare che la mascherina e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni. In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere una nuova mascherina.

ISTRUZIONI D'USO:



1. Disinfettare accuratamente le mani con un gel a base di alcol o in alternativa lavare accuratamente le mani con sapone per almeno 60 secondi. Aprire la confezione, estrarre una mascherina e richiudere la confezione per proteggere le restanti mascherine. Non utilizzare la mascherina se è stata precedentemente utilizzata.
2. Tenendo l'arco nasale in alto e la parte colorata verso l'esterno, indossare la mascherina sulla faccia e agganciare i due elastici attorno alle orecchie.
3. Aprire completamente le pieghe della mascherina affinché la faccia sia coperta dal naso al mento compresi.
4. Premere delicatamente l'arco nasale con gli indici di entrambe le mani lungo il profilo fino a fare aderire la mascherina. Non tenere mai la mascherina appesa al collo.
5. Una volta indossata non toccare la mascherina con le dita. Utilizzo massimo consentito: 4 ore consecutive.
6. Sostituire la mascherina se danneggiata, contaminata o umida.
7. Non disperdere la mascherina nell'ambiente. Non reintrodurre nella confezione una volta utilizzata. Smaltire la mascherina in un contenitore per rifiuti appropriato. Se utilizzata fuori dall'ambiente ospedaliero buttare in un sacchetto dell'indifferenziata, chiudere il sacchetto e inserire dentro un nuovo sacchetto insieme al resto dell'indifferenziata. In ambito ospedaliero smaltire come rifiuto medico-ospedaliero.

N.B. Nel caso in cui non sia possibile ottenere una tenuta perfetta, non entrare in aree contaminate. Sostituire la mascherina immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la mascherina subisce danneggiamenti, o per problemi di aderenza al viso. L'osservanza attenta di queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro della mascherina.

APPLICAZIONI:

Raccomandata per tutti i cittadini a scopo precauzionale ed obbligatorie per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni o che non possono mantenere una distanza inferiore a 1 metro sui luoghi di lavoro. Può inoltre essere utilizzata dalle aziende come DPI in base all'art 15 comma del DL 18 del 17 marzo 2020.


AVVERTENZE:

- Utilizzare la mascherina entro la data di scadenza.
- La mascherina è monouso, pertanto deve essere eliminata al termine del suo utilizzo smaltendola in conformità con le normative.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non utilizzare il prodotto se allergici a uno o a più materiali.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- La mascherina non annulla il rischio di contrarre malattie e infezioni.
- La mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze sull'utilizzo della mascherina può ridurre l'efficienza e causare malattie, danni permanenti e perfino la morte. Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.
- Se la mascherina è danneggiata/sporca o la respirazione diventa difficile, lasciare l'area contaminata, smaltire la maschera e indossarne una nuova.

Condizioni di conservazione - intervallo di temperatura: -20 °C ~ +55 °C

Condizioni di conservazione - umidità relativa massima: <93%


Periodo di conservazione: 60 mesi non aperte

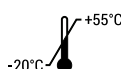

Importata e distribuita da Polonord Adeste Srl

Via Clodoveo Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore (BO), Italia

Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

 **Data di produzione:**
vedere sulla confezione

 **Data di scadenza:**
vedere sulla confezione

 **Numero lotto:**
vedere sulla confezione

Made in China